



Anleitung zur Installation der QuickVet[®]- Software

1. Öffnen Sie die URL in einem Internetbrowser und speichern Sie die Anwendungsdatei (exe.Datei) auf einem leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie Ihr QuickVet ein.
3. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port auf der Rückseite des Gerätes ein.
4. Wählen Sie Menü „**Einstellungen**“ aus.
5. Wählen Sie Menüpunkt „**Software V.**“ aus.
6. **←** zum Öffnen des Menüs drücken.
7. **Upgrade** drücken
8. Hinweis: Upgrade to newer version?
Yes zur Bestätigung des Upgrades drücken
9. Das Update startet automatisch
10. Nach Beendigung des Updates startet das Gerät neu
11. Menü „**Einstellungen**“ auswählen
12. Kunde anwählen, Einstellungen kontrollieren und ggf. ändern
 - Patienten –ID erforderlich ja
 - Proben-Nr erforderlich nein
 - Kalibrationserinnerung nein
 - Einheit Fibrinogen g/l
 - Probenzufuhr Hinweis: Einmal
 - erledigt erledigt
13. Gerät ausschalten